

Influenza & COVID-19 Ag Combo Rapid Test Cassette (Swab)

Kurzanleitung


1 Probe entnehmen

Verwenden Sie den im Kit enthaltenen Nasopharyngeal-Tupfer.


1. Führen Sie den Tupfer vorsichtig in das Nasenloch des Patienten ein und erreichen Sie die Oberfläche von hinterer Nasopharynx.
2. Wischen Sie über die Oberfläche des hinteren Nasopharynx. Drehen Sie den Tupfer mehrfach.
3. Ziehen Sie den Tupfer aus der Nasenhöhle.



2 Vorbereitung

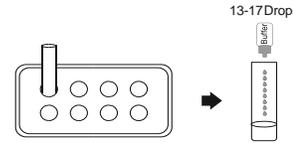


1. Setzen Sie das Testextraktionsröhrchen in den Papierständer ein.
2. Füllen Sie den Probenextraktionspuffer bis zur unteren Markierung in das Extraktionsröhrchen ein (ca. 13-17 Tropfen, 0,5 ml).
3. Fügen Sie den Tupfer in das Extraktionsröhrchen ein und drehen Sie den Tupfer mindestens 6 Mal kräftig gegen den Boden und die Seiten.
4. Lassen Sie den Tupfer 1 Minute im Extraktionsröhrchen stehen.
5. Drücken Sie das Röhrchen von aussen mit den Fingern um den Tupfer auszuwinden und entfernen Sie diesen anschliessend.
6. Setzen sie den Aufsatz auf das Röhrchen.

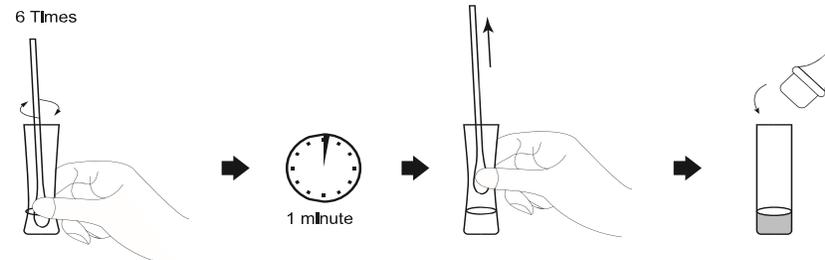


3 Testprozedur

1. Legen Sie die Testkassette flach auf.
2. Geben Sie 4 Tropfen (ca. 100 µl) der Solution in jede Probenvertiefung.
3. Warten Sie, bis die Farbmarkierungen angezeigt werden. Das Ergebnis sollte in 15 Minuten abgelesen werden.

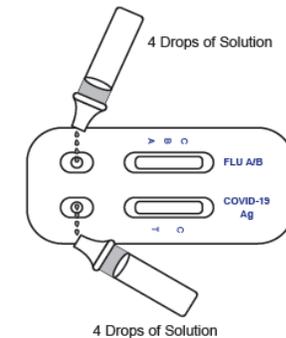

4 Interpretation der Ergebnisse (Die Linie „C“ gilt als Kontrolllinie)

Für COVID-19

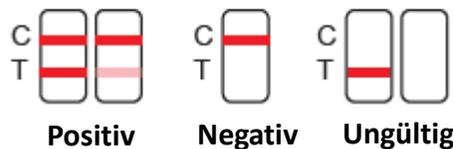

Für Flu A/B

